



CLINIK DES AL

Medicinski pripomoček

Neutrarno, hitro delujoče dezinfekcijsko sredstvo na osnovi alkohola.

PODROČJE DELOVANJA:

Clinik Des Al je pripravljena alkoholna raztopina za hitro in učinkovito razkuževanje medicinskih pripomočkov in medicinskega inventarja (škarij, stetoskopov, oralnih termometrov, bolnišničnih pozivnikov, bolniških postelj, miz za prevoz in pregled, ...) ter ostalih površin v bolnišničnem in ambulantnem okolju (delovnih površin, zidov v medicinskih ustanovah in čakalnicah za bolnike, sanitarnih površin, ...) ter povesod, kjer je povečano tveganje okužb.

NAČIN UPORABE

Clinik Des Al se uporablja kot koncentrat za pršenje in potapljanje. Z razpršilko nanesite sredstvo z razdalje okoli 30 cm in pustite učinkovati. Površina bo po kratkem času suha in je ni potrebno dodatno izpirati. Priporočljivo doziranje je 40 do 50 ml/m². Pri postopku s potapljanjem material potopite v dezinfekcijsko sredstvo in pustite učinkovati. Po končanem postopku dezinfekcijsko sredstvo zavržite. Najboljši dezinfekcijski učinek dosežete na predhodno dobro očiščenih površinah. Zagotovite, da bo površina popolnoma omočena.

Po sledečem protokolu deluje tudi čistilno:

- Površino napršimo, da je popolnoma omočena, počakamo 1 minuto da se umazanija omoči in nato zbrišemo s čisto krpo. V primeru velikega onesnaženja postopek ponovimo.
- Na čisto površino za dezinfekcijo uporabimo gornji postopek.

Razkužilo: 100g Clinik Des Al vsebuje 65g Etanola in 4g Propan-2-ol.

VARNOSTNI NAPOTKI

Pred uporabo preberite etiketo. Za dodatna pojasnila se obrnite na proizvajalca izdelka. Clinik Des Al ni primeren za uporabo na površinah in materialih, občutljivih na alkohol. Priporočljiva je uporaba zaščitnih rokavic. Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. Ne razprševati po električnih napravah.

OPOZORILA

Nevarno. Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. Kajenje prepovedano. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.



ROK UPORABE

3 leta od datuma proizvodnje odtisnjene na embalaži. Datum proizvodnje in številka serije sta odtisnjena na embalaži.

PROIZVAJA

KIMI d.o.o., Planjava 1, 1236 Trzin, Slovenija; tel: +386 1 5300 550; fax: +386 1 5300 581; e-mail: info@kimi.si; www.kimi.si

Proizvajalec:

KIMI d.o.o.
Planjava 1
1236 Trzin, Slovenija
Telefon: +386 1 5300 550
info@kimi.si, www.kimi.si

Druge informacije:

Datum izdaje: 29.05.2018
Številka izdaje: 03
Stran: 1/3

Učinkovitost:

UČINKOVITOST	Čas delovanja
BAKTERICIDNO DELOVANJE	
SIST EN 1040:2006 (vključno MRSA) SIST EN 13727:2004	30 sekund
MIKOBaktericidno delovanje	
SIST EN 14348:2005 Mycobacterium terrae (TBC)	30 sekund
VIRUCIDNO DELOVANJE	
SIST EN 14476:2013+A1:2015 Norovirus	15 sekund
SIST EN 14476:2013+A1:2015 Adenovirus*	60 sekund
Smernici DVV/RKI Hepatitis B virus, Hepatitis C virus, HIV virus, H5N1, H1N1	30 sekund
Virus vakcinije	15 sekund
FUNGICIDNO DELOVANJE	
SIST EN 1275:2006 SIST EN 1650:2013 SIST EN 13624:2004 Candida albicans	30 sekund
SIST EN 13697:2015 Candida albicans	60 sekund
SIST EN 1275:2006 SIST EN 13697:2015 SIST EN 13624:2004 Aspergillus niger	5 minut

* umazani pogoji

Proizvajalec:

KIMI d.o.o.
Planjava 1
1236 Trzin, Slovenija
Telefon: +386 1 5300 550
info@kimi.si, www.kimi.si

Druge informacije:

Datum izdaje: 29.05.2018
Številka izdaje: 03
Stran: 2/3

KOMPATIBILNOST MATERIALOV Z DEZINFEKCIJSKIM SREDSTVOM CLINIK DES AL

- 1 = Odlična.** Ni učinkov.
- 2 = Dobra.** Pri daljših izpostavitvah vidni manjši učinki. Kvalitete in uporabnosti materiala ne zmanjša, lahko povzroči rahlo razbarvanje.
- 3 = Vprašljiva.** Pri daljših izpostavitvah vidni učinki. Lahko povzroči mehčanje, zmanjšano trdnost in napihovanje materiala. Izgled lahko postane estetsko vprašljiv. Preveriti pri proizvajalcu naprave/površine. Po nanosu je priporočljivo površino obrisati.
- 4 = Nezadostna.** Uporaba z materiali odsvetovana. Lahko povzroči hujše estetske in funkcionalne poškodbe površin.

MATERIAL	OCENA KOMPATIBILNOSTI
ABS plastika	2
Aluminij	1
EPDM	1
Keramika	1
Lateks	1
LDPE	1
Neopren	2
Nerjaveče jeklo 304	2
Nerjaveče jeklo 316	1
Nitril	1
PEEK	1
PVC	3
Silikon	1
Teflon – PTFE	1
Titanovo jeklo	1

Tehnični list vam pomaga pri uporabi naših izdelkov in Vam posreduje potrebne informacije. Tehnični napotki in navodila za uporabo so izdelana na osnovi našega trenutnega tehničnega znanja in so namenjena uporabi v normalnih obratovalnih okoliščinah. Naša svetovalna služba Vam rada priskoči na pomoč pri obratovanju v posebnih pogojih.

Priporočila za uporabo izdelka so zasnovana na znanstvenih izsledkih. Natančnejša priporočila, kot na primer kompatibilnost z materiali je možno le v posameznih primerih. Naša priporočila so neobvezna in ne predstavljajo garancije. Ne izključujejo uporabnikovega testiranja za njegove namene in postopke. To v polni meri izključuje odgovornost proizvajalca.

Proizvajalec:

KIMI d.o.o.
Planjava 1
1236 Trzin, Slovenija
Telefon: +386 1 5300 550
info@kimi.si, www.kimi.si

Druge informacije:

Datum izdaje: 29.05.2018
Številka izdaje: 03
Stran: 3/3